

## **CREATININA – urinaria 24 h**

Sigla test: **CREAUR**

Codice SISS: 0090163.03

Metodo analitico: Picrato cinetico

Variabilità biologica individuale (%): n.d.

Significato clinico: I livelli urinari di creatinina sono indicatori della funzionalità glomerulare. I livelli di creatinina nei drenaggi sono utili al clinico per valutare la natura del versamento oggetto di drenaggio. La creatinina su urine dopo fine turno lavorativo viene utilizzata per normalizzare alcuni indicatori di esposizione professionale. La clearance della creatinina permette di conoscere valore del filtrato glomerulare e di conseguenza valutare l'andamento di alcune nefropatie. La clearance della creatinina si calcola in base alla formula:  $Cl \text{ creatinina} = U \times V / P$  U = creatinina urinaria mg/dL P = creatinina serica mg/dL V = Volume urinario/minuto

Strumento: COBAS PRO c503

Unità di misura: g/L

Valori di riferimento: 0.6 – 1.8

Tipo campione: Urine

Volume minimo campione: 10 mL

Tappo provetta/contenitore: Cont. Urine 24h

Volume provetta/contenitore: 2500 mL

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 1

Modalità di conservazione e trasporto: Stabile 5 giorni a 2 - 8°C

Informazioni aggiuntive: Raccolta urine delle 24 ore. Scartare la prima minzione del mattino, (inizio raccolta) e raccogliere in un contenitore adeguato tutte le successive minzioni compresa quella del mattino seguente (fine raccolta) conservare a temperatura ambiente.

Data aggiornamento: 07/10/2025

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica."