

URATO urinario

Sigla test: URAUR

Metodo analitico: Enzimatico uricasi/perossidasi

Significato clinico: La quantità di urea eliminata con le urine dipende dal contenuto proteico della dieta una diminuita escrezione urinaria di urea in numerose affezioni renali sia da causa prerenale, renale che extra renale.

Strumento: COBAS PRO C503

Unità di misura: g/24h

Valori di riferimento: 0.25 – 0.75

Tipo campione: Urine

Volume minimo campione: 10 mL

Tappo provetta/contenitore: Contenitore urine 24h

Volume provetta/contenitore: 2500 mL

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 1

Modalità di conservazione e trasporto: Urine stabili 3 giorni a temperatura ambiente; per tempi di conservazione maggiori alcalinizzare le urine (pH > 8) e refrigerare o congelare.

Informazioni aggiuntive: Raccolta urine delle 24 ore. Scartare la prima minzione del mattino, (inizio raccolta) e raccogliere in un contenitore adeguato tutte le successive minzioni compresa quella del mattino seguente (fine raccolta) conservare a temperatura ambiente

Data aggiornamento: 07/10/2025

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica."